

NÁVOD NA POUŽITÍ



Datum: 20-08-15

INKONTINENČNÍ SVORKA

Před použitím si pečlivě přečtěte následující varování, bezpečnostní opatření a návod k použití.

1.0 Účel použití

Inkontinenční svorka je produkt určen k umístění kolem penisu jako prevence úniku moči.

2.0 Popis produktu:

Existuje několik druhů svorek. Cunningham Clamp je jedním z nejvíce používaných typů. Vnitřek svorky je flexibilní, měkká část je vyrobená z pěny tak aby komfortně pasovala na Váš penis. Vnější strana je vyrobená z kovu s několika zářezy na vrchní straně k nastavení těsnosti svorky.

3.0 Návod k použití:

3.1 Otevřete inkontinenční svorku a umístěte ji podélně kolem penisu asi v půli cesty. Potom stlačte obě strany svorky v horní části, kde jsou těsnicí zuby, k sobě a ujistěte se, zda není svorka utažena příliš těsně.

3.2 Pro uvolnění svorky stiskněte směrem dovnitř pružinové drátky, které jsou umístěny na obou stranách a jsou zaraženy v těsnicích zubech. Ujistěte se, že svorka není utažena tak pevně, aby se nezastavil krevní oběh.

4.0 Varování:

Snažte se svorku nepoužívat nepřetržitě po celý den (např. Použít pouze na několik hodin ráno a pak znovu zase v noci. Obraťte se na lékaře nebo zdravotní sestru pokud:

- Objevíte nějaký výtok z Vašeho penisu, svědění, zápach nebo bolest.
- Pokud zjistíte, že nemůžete vyprázdnit močový měchýř.

Pokud máte jakékoliv dotazy, volejte BIORAD Medisys Pvt Ltd.

6.0 Skladování a manipulace:

Tyto produkty jsou dodávány sterilní, jsou sterilizované etylenoxidem v peel-open balení. Produkty jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte výrobek, pokud vznikla pochybnost, že došlo k poškození sterility výrobku. Skladujte na chladném a suchém místě s teplotním rozmezím 28°C +/- 5°C. Vyhněte se dlouhodobému působení přímého slunečního světla. Po vyjmutí z obalu zkontrolujte produkt, zda nedošlo k jeho poškození.

CE
0086 tento symbol znamená, že produkt plně vyhovuje evropské směrnici
MDD/93/42/EHS.

NÁVOD NA POUŽITÍ



Datum: 20-08-15

Adresa výrobce:

Biorad Medisys Pvt. Ltd.

“Biorad House”, # 660, Eshwari industrial estate,
Hulimavu, Bannerughatta road, Bangalore-India.

Ph: 0091-80-65658007/26480683

Fax: 0091-80-26480684.

Autorizovaný zástupce pro Evropskou Unii:

MT Promedt Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80,

D-66386 St. Ingbert.Germany.

Tel.: +49 (0) 6894 581020,

Fax: +49 (0) 6894 581021 E-

mail: info@mt-procons.com

www.mt-procons.com

Revize ze dne: 10.1.2016