

Indikace a použití

Kompresní systém Premofix® se používá k vyvíjení tlaku na punktované tepny a žíly po invazivních diagnostických a terapeutických výkonech, jako jsou PCTA, implantace stentů, EPS léčba a angioplastika apod.


Postup aplikace systému Premofix® pro femorální přístup

- Umístěte Premofix® uno kolem pasu pacienta
- Vytáhněte sheath a stlačením zastavte počáteční krvácení (3–15 min)
- Na místo vpichu přiložte 2–3 sterilní kompresy a Zeppelin
- Uzavřete stehenní pás Premofix® uno a zkontrolujte citlivou oblast
- Zkontrolujte pulz distálně od místa vpichu
- Hotovo

Premofix® uno R – aplikace



Premofix® uno EPS – aplikace

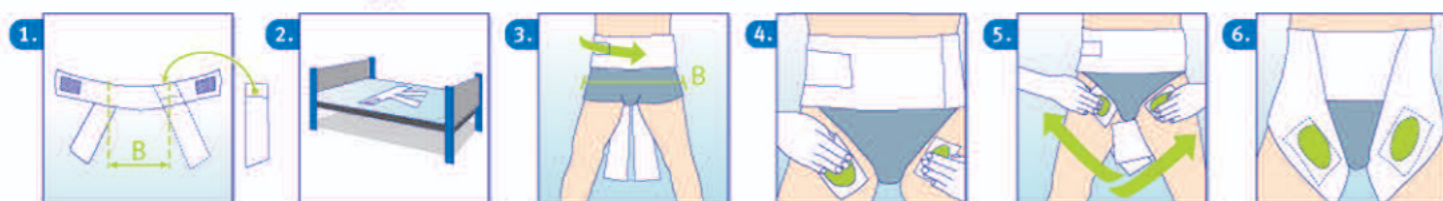

Premofix® Radialis

Pro radiální místo vpichu použijte Premofix® Radialis k okamžité podpoře uzávěru bezprostředně po vytažení sheathu.

Premofix® Brachialis

Pro brachiální místo vpichu doporučujeme Premofix® Brachialis k okamžité podpoře po vytažení sheathu.

K dispozici je široká škála produktů pro optimální ošetření různých míst vpichu:

Obj. č.	Tlakové bandáže/kompresní prostředky	Nejmenší dodací jednotka	Obsah balení
DV1050R	Premofix® uno right	1	36
DV1050L	Premofix® uno left	1	36
DV1060	Premofix® uno EPS	1	24
DV1062	Premofix® uno R-EPS	1	30
DV1064	Premofix® uno L-EPS Band only	1	20
DV1010R	Premofix® plus right	1	20
DV1010L	Premofix® plus left	1	20
DV1080N	Premofix® Radialis N	1	40
DV1082T	Premofix® Radialis T	1	40
DV1085	Premofix® Brachialis	1	30
K1010H	Pressure® device Helene	1	100
K1010Z	Pressure® device Zeppelin	1	100
K1010U	Pressure® Berliner UFO M	1	50
K1012UX	Pressure® Berliner UFO XL	1	60

MADE
IN
GERMANY

Andanza International
Medical Healthcare
Inh. Ulrich Östreicher
Zum Werrablick 4
37276 Meinhard-Germany

Phone +49 56 51 - 320 512
Fax +49 56 51 - 320 513
Mail info@andanza.de
Home www.andanza.de

QM-Certified
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 9001

CE

Andanza

27052014

Premofix® Compression

Nová generace péče o místo vpichu



one step ahead...

Andanza

Premofix® Compression

Inovativní alternativa ke kompresním bandážím nebo náplastovým proužkům



- **Rychlá aplikace**
Lze aplikovat během několika sekund
- **Snadný přístup k místu vpichu**
Lze znovu otevřít a uzavřít během několika sekund
- **Nízká míra komplikací**
Bez poškození kůže, bez vzniku napěťových puchýřů, bez škrcení; krvácení je sníženo díky rychlé fixaci bez použití lepidla
- **Perfektní přizpůsobení s vysokou stabilitou**
Díky speciálnímu elastickému materiálu a unikátní 5vrstvé konstrukci
- **Omezený počet velikostí**
Snadné objednávání a minimální nároky na skladování
- **Ochrana proti MRSA**
Speciální vnitřní polopropustná vrstva chrání místo vpichu před bakteriální infekcí



Premofix® uno bandáže

Lze použít s uzavíracími zařízeními i bez nich




- **Neinvazivní**
V těle nezůstávají žádné části
- **Výrazně nižší náklady**
I při celkovém zohlednění všech nákladů
- **Velmi komfortní**
Pacienti mohou jít na toaletu již po 6 hodinách (6 French)
- **Jeden produkt pro všechny vel. French (4–12)**
- **Dodatečná bezpečnost a ochrana**
Lze použít společně s uzavíracím zařízením



Kompletní femorální sortiment dle vašeho výběru



Při punkci vlevo i vpravo
Premofix® uno EPS – Obj. č. DV1060
Pro pokrytí obou femorálních míst vpichu, vlevo i vpravo
S flexibilní levou částí součástí balení – univerzální velikost

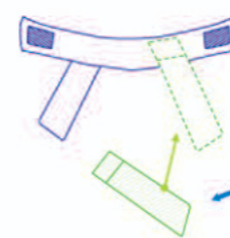

Při punkci vpravo – a případně i vlevo
Premofix® uno R-EPS – Obj. č. DV1062
a
Premofix® uno L-EPS Band – Obj. č. DV1064



Při punkci pouze vpravo nebo vlevo
Pro pravé místo vpichu použijte
Premofix® uno R – Obj. č. DV1050R
Pro levé místo vpichu použijte Premofix® uno L – Obj. č. DV1050L

Kompresní prostředky

Zeppelin – standardní prostředek pro individuální kompresi

Speciální prostředek ve tvaru malého zeppelinu s jedinečnou vlastností: **3 různé strany** umožňují zvolit míru komprese.

Stačí zvolit vyšší nebo nižší stranu pro individuální kompresní účinek, případně použít i jednu ze stran. Speciálně vyvinuto pro podporu komprese systému Premofix.



Berliner UFO – speciální prostředek pro rozsáhlejší pokrytí místa vpichu

Prostředek ve tvaru malého UFO se **2 různými stranami** pro individuální volbu komprese.

Vhodný také pro kompresi dvou nebo více vpichů. Dostupný ve dvou velikostech průměru M nebo XL.



one step ahead...